



SEMPRE fixe esta barra de apoio a uma superfície com as peças de fixação adequadas à barra, ao tipo de superfície e ao peso a ser aplicado.



SEMPRE leia as instruções de instalação antes de instalar o produto.

SEMPRE leia as instruções para o usuário final sobre instalação e cuidados com o produto.



SEMPRE coloque as peças de fixação correspondentes nos orifícios da barra de apoio.

SEMPRE chame um profissional experiente e treinado para instalar as barras de apoio.



NUNCA instale parafusos escareados em orifícios fornecidos sem escareamento.

NUNCA faça escareamentos em nenhum orifício das barras de apoio.

NUNCA alargue nenhum orifício de fixação.



CUIDADO! Alargar os orifícios de fixação irá reduzir a força da estrutura e invalidar a garantia ou limite de carga estabelecido.



NÃO deixe fósforos nem cigarros sobre o produto nem nas suas proximidades.

Estas informações são fornecidas sob a condição de que a pessoa que as receber realize seus próprios testes para determinar a adequação do produto à sua finalidade específica.

Para obter mais informações detalhadas sobre este ou outro produto AKW, entre em contato com o seu distribuidor - veja os detalhes na embalagem.




AKW MediCare




Barras de suporte dobráveis


Instruções para instalação e manutenção

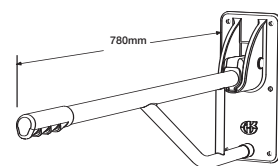


Barra de suporte dobrável simples

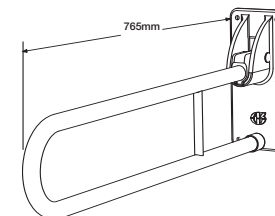

Barra de suporte dobrável dupla

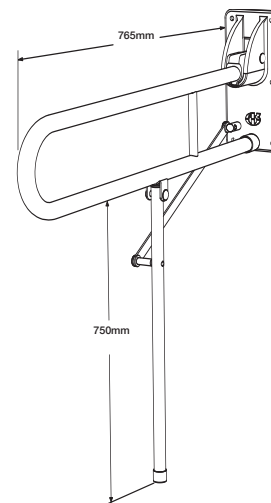

Barra de suporte dobrável dupla com perna de suporte

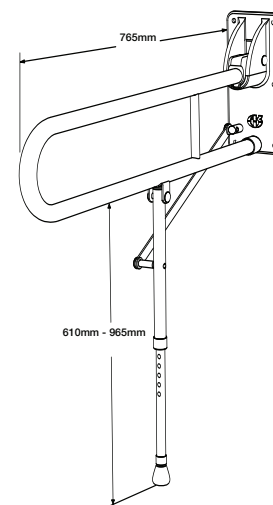

Barra de suporte dobrável dupla com perna ajustável

Cor: branco RAL 9016 / azul RAL 5005 - 01830

Uso em interiores

Instalador: Lembre-se de fornecer estas informações ao usuário final deste produto.

Instruções de instalação

A AKW MediCare recomenda que sejam seguidas estas instruções durante a instalação de barras de suporte dobráveis:

Se a instalação de uma barra de metal for feita em uma área de banho ou ducha, talvez seja necessário ligar à terra a barra de suporte de metal em conformidade com os regulamentos locais para fixação de componentes de metal em áreas de banho ou ducha.

Todas as Barras de Suporte Dobráveis AKW MediCare são projetadas e testadas em conformidade com os requisitos da norma 28 CFR Ch1 Pt36 4.26.3/ABA 609.8.

As barras podem ser instaladas em outros locais, mas a duração máxima do produto pode não ser atingida.

Se não tiver certeza quanto ao tipo de material de fixação a ser usado, consulte um fabricante de material de fixação, informando o tipo e o material da superfície e o modelo do barra de apoio dobrável.

A AKW MediCare não pode determinar o tipo de material de fixação a ser usado devido ao grande número de possíveis tipos e condições de superfícies às quais a barra de apoio dobrável pode ser fixada.

As recomendações acima têm como finalidade proporcionar a duração máxima do produto.

Instruções sobre cuidados com o produto

As barras de apoio metálicos AKW MediCare proporcionam maior mobilidade aos usuários e foram concebidas para uso doméstico geral.

Eles destinam-se a oferecer pontos de apoio ou de segurança nas proximidades de portas, escadas, boxes, banheiras e para outros usos semelhantes.

A barra de apoio dobrável deve ser usada somente para as finalidades a que se destina. Não a utilize para amarrar, pendurar ou prender objetos. Isso pode prejudicar seriamente o desempenho e a segurança.

As barras de suporte dobráveis devem ser verificadas periodicamente como parte de um programa de manutenção e, todas as vezes que apresentarem indícios de dano ou de uso indevido, deverão ser substituídas.

Como manter limpa a Barra de Suporte Dobrável AKW

Este produto deve ser limpo periodicamente com produtos de limpeza domésticos convencionais. Após a limpeza, enxágüe e passe um pano umedecido em toda a superfície para remover os resíduos de produtos de limpeza antes que sequem.

Não use produtos de limpeza fortes ou concentrados ácidos, alcalinos ou de outro tipo, pois esses produtos podem descolorir ou danificar o produto.

Como desinfetar

Se for necessário desinfetar o produto, deverão ser usados procedimentos aprovados para desinfecção de equipamentos e deverão ser observados os avisos relativos aos possíveis efeitos de agentes químicos fortes em plásticos ou revestimento pulverizado.

Embalagem

Os trilhos de suporte dobráveis são fornecidos em uma embalagem de polipropileno para protegê-los até sua instalação; em alguns casos, o produto também pode ser embalado em uma caixa de papelão. Ambas as embalagens são recicláveis e devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais de reciclagem.

Trilho de Suporte Dobrável AKW - Especificações do Produto / Ficha Técnica

Carga central intermitente máxima* :

Barra de suporte simples: 100kg

Barra de suporte dupla: 100kg

Barra de suporte dupla com perna de suporte: 150kg

Barra de suporte dupla com perna ajustável: 150kg

Materiais de fabricação:

Barras: aço

Placa de montagem: liga de alumínio

Material de fixação: aço inoxidável

Acabamento: Revestimento pulverizado de resina de epóxi poliéster, testado em conformidade com o teste de borrfar com salmoura ASTM B117-87

Especificações

Nome	Cumprimento	Diâmetro
Barra de suporte simples:	780mm	28mm
Barra de suporte dupla:	765mm	28mm or 32mm
Barra de suporte dupla com perna de suporte:	765mm	28mm or 32mm

Nota: A perna ajustável pode ser ajustada (com incrementos de 25 mm) com uma altura mínima de 610 mm e uma altura máxima de 965 mm

*A capacidade de peso refere-se somente à barra de suporte, não ao material de fixação nem à retenção na superfície de montagem

Variação padrão de temperatura em operação: de -5°C a +35°C.