



SEMPRE fixe esta barra de apoio a uma superfície com as peças de fixação adequadas à barra, ao tipo de superfície e ao peso a ser aplicado.



SEMPRE leia as instruções de instalação antes de instalar o produto.

SEMPRE leia as instruções para o usuário final sobre instalação e cuidados com o produto.



SEMPRE coloque as peças de fixação correspondentes nos orifícios da barra de apoio.

SEMPRE chame um profissional experiente e treinado para instalar as barras de apoio.



NUNCA instale parafusos escareados em orifícios fornecidos sem escareamento.

NUNCA faça escareamentos em nenhum orifício das barras de apoio.

NUNCA alargue nenhum orifício de fixação.



CUIDADO! Alargar os orifícios de fixação irá reduzir a força da estrutura e invalidar a garantia ou limite de carga estabelecido.



NÃO deixe fósforos nem cigarros sobre o produto nem nas suas proximidades.




AKW MediCare




Barras de metal para apoio


Instruções para instalação e manutenção

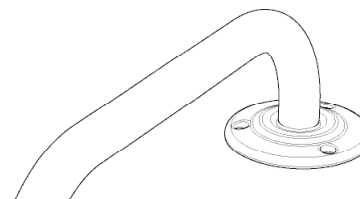

**Flange soldada
série 1100**

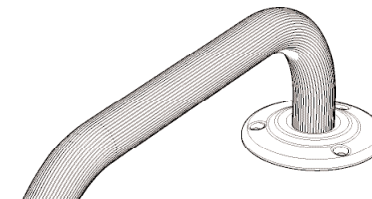


**Flange com pino
série 1300**

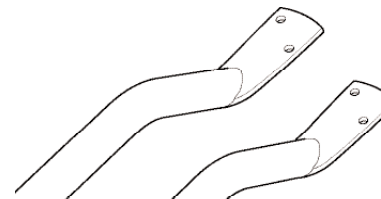

**Aço com ponta achatada
série 1000**

Aço inoxidável série 1200

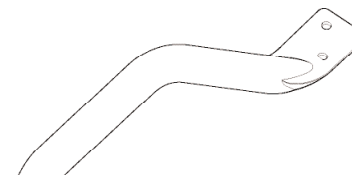

**Curva
série 1750**



**Newel
série 1740**

Estas informações são fornecidas sob a condição de que a pessoa que as receber realize seus próprios testes para determinar a adequação do produto à sua finalidade específica.

Para obter mais informações detalhadas sobre este ou outro produto AKW, entre em contato com o seu distribuidor - veja os detalhes na embalagem.

Cores: branco RAL 9016 / castanho RAL 8015

Designs registrados Patentes pendentes

Uso em interiores e exteriores

Instalador: Lembre-se de fornecer estas informações ao usuário final deste produto.

Instruções de instalação

A AKW MediCare recomenda que sejam seguidas estas instruções durante a instalação de uma barra de apoio AKW:

As barras de apoio de aço doce são recomendadas para todos os usos, exceto para recintos com banheira ou ducha.

As barras de apoio de aço inoxidável são recomendadas para todos os usos, tanto em interiores como exteriores.

Se a instalação de uma barra de metal for feita em uma área de banho ou ducha, a barra de apoio de metal talvez tenha de ser ligada à terra em conformidade com os regulamentos do IEE para fixação de componentes de metal em áreas de banho ou ducha.

Todas as barras de apoio AKW MediCare foram projetadas e testadas para atender aos requisitos da BS EN 12182.

As recomendações acima têm como finalidade proporcionar a duração máxima do produto.

As barras podem ser instaladas em outros locais, mas a duração máxima do produto pode não ser atingida.

Se não tiver certeza quanto ao tipo de material de fixação a ser usado, consulte um fabricante de material para montagem e fixação, informando o tipo e o material da superfície e o modelo da barra de apoio.

A AKW MediCare não pode determinar o tipo de peça de fixação a ser usado devido ao grande número de possíveis tipos e condições de superfícies às quais a barra de apoio pode ser fixada.

Barra de apoio metálica AKW - Especificação do produto / Ficha técnica

Este produto foi concebido para instalação em apenas um local.

Carga central intermitente máxima:

Séries 1100 e 1300	150kg
Séries 1000 e 2000	125kg
Séries 1740 e 1750	125kg

*A capacidade de peso refere-se somente à barra de apoio, não ao material de fixação ou à retenção na superfície de montagem

Varição padrão de temperatura em operação: -5°C a +35°C.

Materiais de fabricação:

Barras e flanges: Aço doce ou aço inoxidável 304, dependendo do modelo da barra.

Acabamento: Revestimento pulverizado de resina de epóxi poliéster, testado em conformidade com o teste de borrifar com salmoura por 96 horas ASTM B117-87

Instruções sobre cuidados com o produto

As barras metálicas de apoio AKW MediCare permitem mobilidade aos usuários e foram concebidas para uso doméstico geral.

Elas destinam-se a oferecer pontos de apoio ou de segurança nas proximidades de portas, escadas, boxes, banheiras e outros locais semelhantes.

As barras de apoio de aço doce são recomendadas para todos os usos, exceto para recintos com banheira ou ducha.

As barras de apoio de aço inoxidável são recomendadas para todos os usos, tanto em interiores como exteriores.

Se a instalação de uma barra de metal for feita em uma área de banho ou ducha, a barra de apoio de metal talvez tenha de ser ligada à terra em conformidade com os regulamentos do IEE para fixação de componentes de metal em áreas de banho ou ducha.

A barra de apoio deve ser usada somente para as finalidades a que se destina. Não a utilize para amarrar, pendurar ou prender objetos. Isso pode prejudicar seriamente o desempenho e a segurança da barra.

As barras de apoio devem ser verificadas periodicamente como parte de um programa de manutenção e, todas as vezes que apresentarem indícios de dano ou de uso indevido, deverão ser substituídas.

Como manter limpa a barra de apoio AKW limpa

Este produto deve ser limpo periodicamente com produtos de limpeza domésticos convencionais.

Após a limpeza, enxágüe a barra e passe um pano umedecido em toda a sua superfície para remover os resíduos de produtos de limpeza antes que sequem.

Não use produtos de limpeza fortes ou concentrados ácidos, alcalinos ou de outro tipo, pois esses produtos podem descolorir ou danificar o produto.

Como desinfetar

Se for necessário desinfetar o produto, deverão ser usados procedimentos aprovados para desinfecção de equipamentos e deverão ser observados os avisos relativos aos possíveis efeitos de agentes químicos fortes em plásticos ou revestimento pulverizado.

Embalagem

A barra de apoio é fornecida em uma embalagem de polipropileno para protegê-la até sua instalação; em alguns casos, o produto também pode ser fornecido em uma caixa de papelão. Ambas as embalagens são recicláveis e devem ser eliminadas de acordo com as regras locais de reciclagem.